



biotec italia  
Medical



WEBSITEMİZİ  
ZİYARET EDİN

# è-life®


Center Focused Ultrasound



**nora®**  
MEDİKAL ESTETİK KOZMETİK

  
MADE IN ITALY

# CFU: Derinlemesine hareket edebilen, daha önce sadece ameliyatla elde edilebilen teknolojik yenilik.

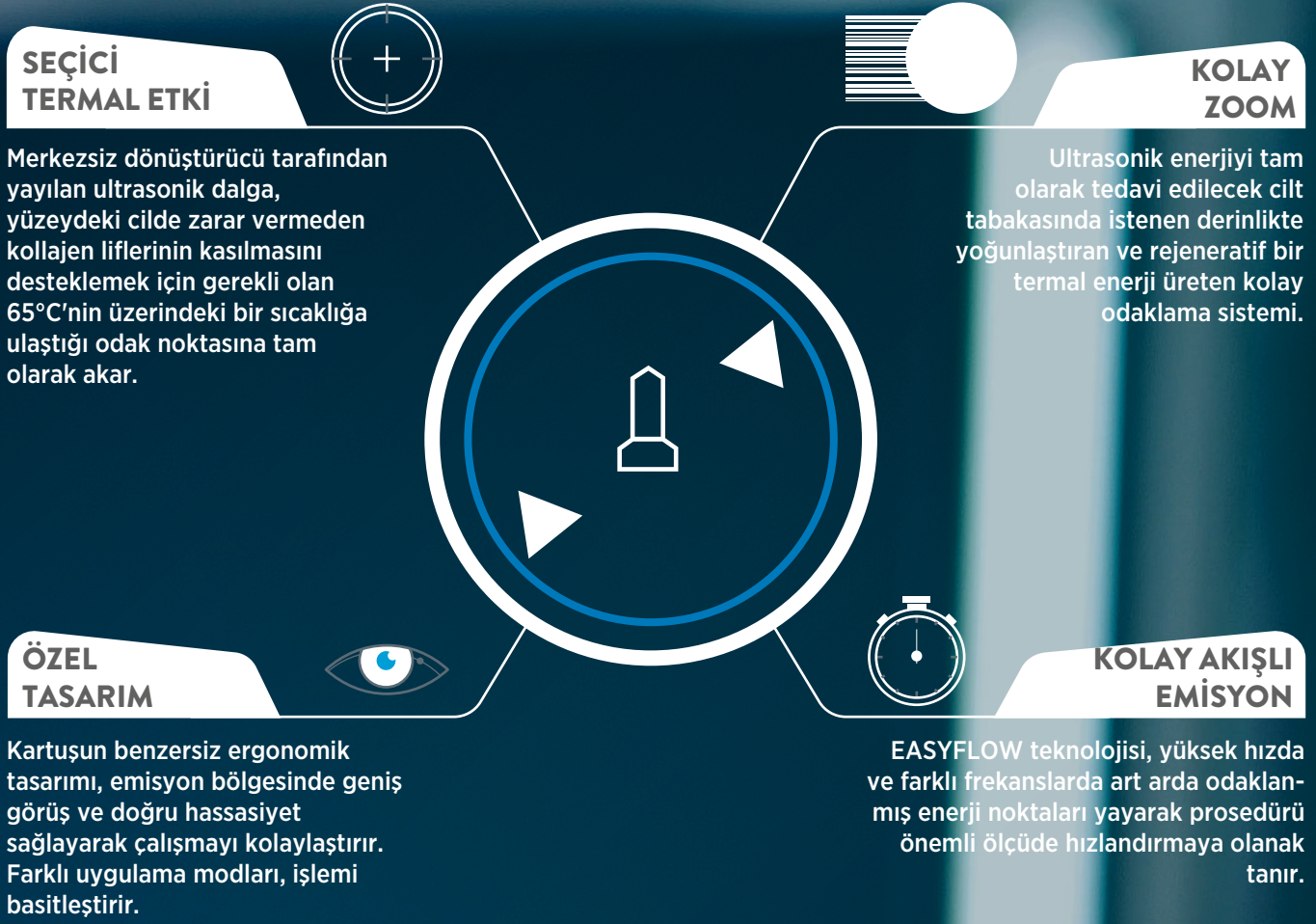


## ESTETİK YÜZ VE VÜCUT BAKIMLARI

Yüz derisinin estetik tedavisinde odaklanmış ultrason, yayılan ultrasonun enerjisinin ve etki derinliğinin ayarlanması yoluyla her bireyin ihtiyacına göre özelleştirilebilir. Yüz bölgesi için kullanılan ultrason, 4MHz frekansında ve 1.5, 3.0 ve 4.5mm odak derinliğinde yayar. Etki derinliği, yüz kaslarını kaplayan ve yüz kaslarını üstteki dermise bağlayan fan şeklindeki yüz SMAS'ına ulaşabilir. Yağ dokusunun estetik tedavisinde hacmini azaltmak için ultrason 2MHz frekansta ve 6 ila 13 mm arasında farklı derinliklerde yayar ve yağ dokusunun mükemmel şekilde yeniden şekillenmesini sağlar.

## HİPERHİDROZUN TIBBİ TEDAVİSİ

Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrasonlu tıbbi prosedürün hiperhidroz ve ozmohidroz tedavisinde etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Fokusal ultrason hem aşırı terlemeden sorumlu ektrin bezleri hem de kötü kokudan sorumlu apokrin bezleri tedavi etmek için kullanılabilir. Tedavi hızlı ve ağrısız bir şekilde, toksin kullanılmadan, yan etki olmaksızın gerçekleştirilir ve kalıcı sonuçlarla anında iyileşme sağlanır.

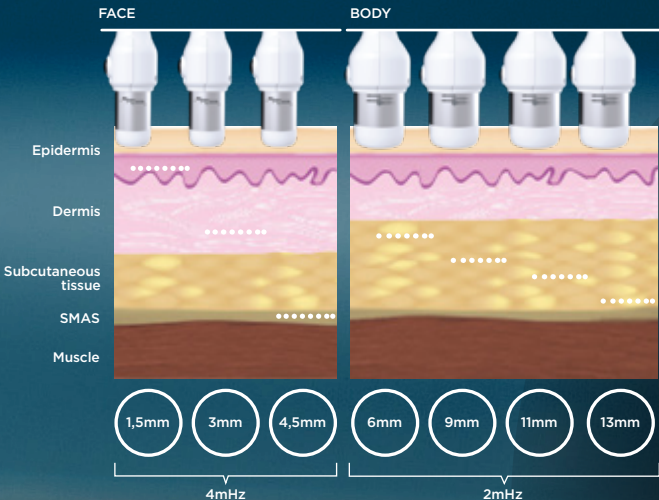

**Odaklanmış ultrasonlar, yalnızca seçilen odak mesafesinde tedavi edilecek alana nüfuz eder.**

# ACE: Dönüştürücünün etkinliğini ve dayanıklılığını koruyan ve tedavi güvenliğini garanti eden patentli\* tescilli teknoloji.

## DİNAMİK SOĞUTMA

ACE, soğutma sıvısının transdüser üzerinde aktif dolaşımına izin verir ve kararlılığını ve verimliliğini garanti ederek zaman içinde çalışmayı korur.

## YÜZEYDE SIFIR ISI

ACE Teknolojisi, transdüser tarafından üretilen ısıyı azaltarak yüzeydeki ısı etkisini ortadan kaldırır ve işlemin güvenliğini artırır.

## FREKANS KARARLIĞI

Dönüştürücünün frekans değişimleri, onu aşırı ısınmaya karşı koruyan ACE teknolojisi ile sınırlıdır; aksi takdirde, verimini düşüren termal enerji dağılımı olayları meydana gelebilir.

## UZUN TRANSDÜSER ÖMRÜ

ACE Teknolojisi, el aletinin içindeki dönüştürücünün ömrünü 10.000.000 darbeye kadar artırır. Ayrıca emisyon frekansını sabit tutarak verimini garanti eder.



## SIFIR ZAYIFLAMA

ACE Teknolojisi, durgun bir sıvı odasında yayılan dönüştürücülere özgü ses dalgası zayıflama olgusunu ortadan kaldırır. Emisyonun heterojenliği, emisyon odasında hava boşluklarının ve dağınık gözeneklerin bulunmaması ile garanti edilir.

## Tedavi endikasyonları

### Tıbbi

- Hiperhidroz tedavisi.

### Tıbbi Olmayan

- Sıkılaştırma ve cilt gençleştirme.
- Yüzün ve boynun non-invaziv lifting etkisi.
- Boyun ve dekoltenin elastik olmayan derisi
- Perioküler, maksiller ve nazolabial kırışıklıkların azaltılması.
- Lokalize yağ birikimlerinin tedavisi.
- Akne izlerinin tedavisi.



Öncesi



1 seans sonrası



Öncesi

90 gün sonra / 1 seans



Öncesi

60 gün sonra / 1 seans



Öncesi

60 gün sonra / 1 seans



Öncesi

60 gün sonra / 2 seans



Öncesi

1 seans sonra



Öncesi

30 gün sonra / 2 seans

## TEKNİK VERİ

GERİLİM BESLEMESİ	230Vac - 50/60Hz
MAKSİMUM GÜÇ	200VA
SINIF VE TÜR	I - BF
SİGORTALAR	2 x F4A 250V
BOYUTLAR	700 x 500 x 1300mm
AĞIRLIK	45 kg
ATIŞ SÜRESİ	from 50ms to 200ms
ATIŞ EMİSYON ADIMI	from 1Hz to 10Hz

## YÜZ

ODAK DERİNLİĞİ	1,5 / 3 / 4,5mm
YÜKSEK GÜÇ	10W
DELİK ÇAPI	15mm
FREKANS	4MHz

## APLİKATÖRLER

## VÜCUT

ODAK DERİNLİĞİ	6 / 9 / 11 / 13mm
YÜKSEK GÜÇ	20W
DELİK ÇAPI	25mm
FREKANS	2MHz



Coaxmed %100 İtalya'da üretilmiştir.  
Biotec Italia, orjinal bir ürünün gerçekliğini ve üretim sürecinin her bir detayına gösterilen sonsuz dikkat sebebiyle ürünlerinin üstün kalitesini garanti eder.

Biotec Italia şunları garanti eder;  
Tamamen İtalya'da üretilmiştir.  
Sadece İtalyan yan mamülleri kullanılarak üretilmiştir.  
En yüksek kalitedeki malzemelerle üretilmiştir.  
Biotec Italia'nın kendi teknolojik tasarımları kullanılarak üretilmiştir.

Etiler Mah. Mürselpaşa Bulvarı No: 22/52 Konak/İzmir

Tel: 0232 445 45 49

Fax: 0232 448 48 02

info@noramedikal.com.tr

www.noramedikal.com.tr

[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) /noramedikal



ISO 13485

BUREAU VERITAS  
Certification



1370

